

車いす用「昇降座面」  
**ラク〜ダ**

**取扱説明書**

ご使用前に必ずお読みください。



※外観、及び仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

**保証書付き**

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日・販売店などの記入をお確かめください。

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この商品を正しく安全に使用していただくために、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。  
お読みになられた後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。





ご注意

車いす用昇降座面「ラク〜ダ」は一般用車いすの取扱いとは異なる点がありますので、本取扱説明書に記載の事項を必ず遵守してください。

## 座面ユニットの取り付け方

車いすの幅に合わせる ※座面フレームの内幅が330mm~360mmの車いすに取付け可能です。

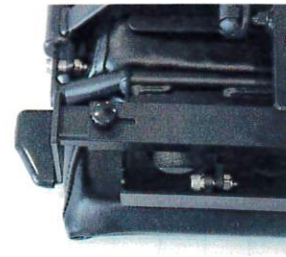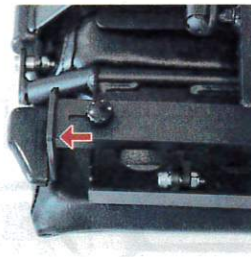


①座面ユニットの前後を持ちながら、車いすの座面フレームにひっかけるように乗せます。  
※取り付けの際に、座面ユニットを傾ける等の操作が必要になる場合があります。

②フックが座面フレーム幅に合わない場合は、調整ネジを緩め、座面フレームの幅にフックを調整した後、調整ネジを締め直してください。(調整幅、左右合わせて30mmまで)

**⚠ ご注意** フックの幅は、必ず車いすのフレーム幅に合わせて使用してください。また、フックは必ず、左右で均等になるように調整を行ってください。調整を行わないまま使用されますと、座面ユニットが脱落しけがをする恐れがあります。  
※座面ユニットの裏面は機構部品等の突起物がありますので、手・指をけがしないよう取扱い時にはご注意ください。

## 座面反発力の調整方法

### 座面反発力の調整方法

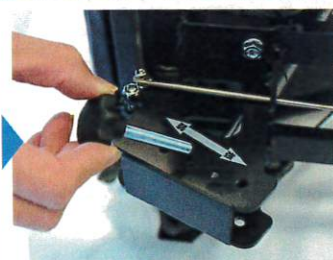

①座面ユニットを開いた状態にし、横向きに立てます。

②ダンパー調整用のネジを緩め、ノブを取り外します。

③ダンパーの穴を目的の強さの穴に合わせ、ノブを取付けた後、ネジを締めてください。


④座面ユニットを閉じた状態にして、車いすに取付けます。

※ノブを取り外す際、ダンパーの軸を無くさないようにしてください。

**⚠ ご注意** 座面ユニットを開閉する時は、必ず平らな場所で行い、また指等を挟まないように気を付けて行ってください。また、調整用ネジは必ず締まっていることを確認してください。緩んでいる場合、ダンパーが脱落しけがをする恐れがあります。

## 座面ユニットの取り外し方

車いすの折りたたみ ※座面ユニットを取付けた状態では、車いすを折りたたむことができません。

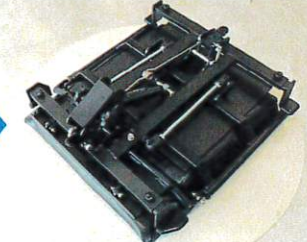

①座面ユニットの前後を持って、上に引き抜くようにすると簡単に取り外せます。  
※取り外しの際に、座面ユニットを傾ける等の操作が必要になる場合があります。

②左右の肘掛けを持って車いすを折りたたみます。

③外した座面ユニットは、安全な場所に収納してください。

**⚠ ご注意** 必ず座面が下がった状態で取り外しを行ってください。車いすの折りたたみ時には、指などを挟みけがをする恐れがありますので充分注意をしてください。  
※座面ユニットの裏面は機構部品等の突起物がありますので、手・指をけがしないよう取扱い時にはご注意ください。

## 保証書

商品名	ラクーダ	品番	KA-003	販売店名(お買い上げ店)、住所、電話番号
お客様	お名前	お買い上げ日	年 月 日	
	ご住所	保証期間	お買い上げ日より1年 ※付属品を除く	
	電話番号 ( ) -			

本書はお買い上げ日から1年間、無償修理規定に基づいて無償修理をお約束するものです。  
取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき、無償修理をいたしますので、本製品と保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店または製造販売元に修理をご依頼ください。  
※ご記入の無い場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

**kyowa**

製造販売元  
株式会社  
キョウワコーポレーション

E-mail: info@kyw-system.co.jp URL: http://kyw-system.co.jp

広島本社: 〒733-0832 広島県広島市西区革津港1-9-1 TEL 082-278-9797 FAX 082-277-3734  
東京支店: 〒100-0047 東京都中央区本町1-13-1 TEL 03-5244-5973 FAX 03-5244-5974